



Civière de relevage aluminium

Réf. 506301

Civière de relevage en forme de cuillère légère et robuste.

Munie d'un dispositif d'ouverture centrale permettant de glisser les deux parties longitudinales de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient. L'immobilisation du patient est parfaite.

La longueur est adaptable en 3 positions avec verrouillage automatique et sécurisé par goupille à ressort.

La civière se plie en deux pour un stockage aisé.

Surface du plan de couchage rainurée concave.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) Dépliée 167.5 à 204 x 45 x 7 cm. Pliée 120 x 45 x 8,4 cm
Matière	Aluminium
Unité de vente	A l'unité sous carton
Poids	8,6 kg
Couleur	Gris
Charge maximale admissible	159 kg
Livré avec	3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir (avec boucle métal à déverrouillage rapide) 130 cm Système de serrage par coulissement
Garantie	1 an
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1. Conforme EN 1865 CE et ISO 13485
Instructions d'utilisation	La civière de relevage est munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger la victime. Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage. Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.
Entretien	Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre. Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet. Vérifier la civière et les fixations des vis chaque semaine.
Accessoires et Consommables	Réf. 233111 - Housse de transport pour civière SCOOP ®